


NOCOTEST- STICKS

Nocotest

- Fukt den lille puten ytterst på test-stripsen ved å plassere den under strålen fra springen i ca 1 sekund.
- Plasser stripsen i rommet som desinfiseres med Nocospray og les av etter endt syklus ved å sammenligne med skala på boksen (se bilde under)

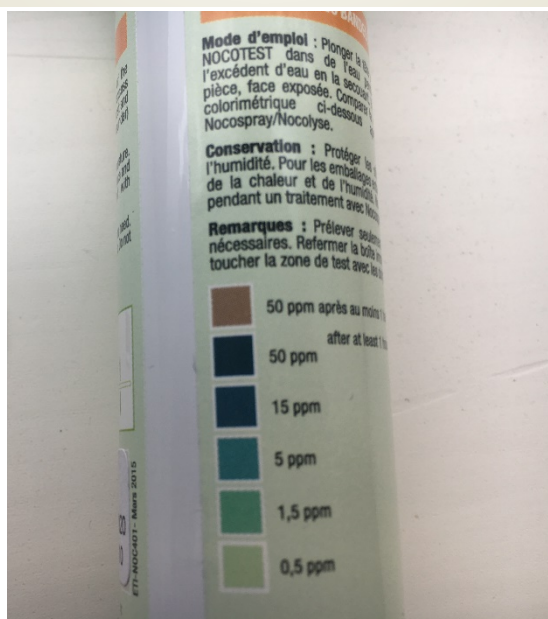

Beskrivelse av produktet

Beholder som inneholder 100 stk test-strips. Stripsene anvendes til å teste effekten av desinfeksjonen. Den vil synliggjøre om tørrtåken har tilstrekkelig metning på f.eks. mindre tilgjengelige områder.

Oppbevares i beholder på et kjølig sted og ikke i nærheten av rommet som behandles.